

Sof-Lex puts och poleringssystem

Sof-Lex™

Spiral- puts och polerhjul



Vi har uppfunnit

hjulet igen

3M ESPE

Vi har uppfunnit hjulet igen



Sof-Lex™ Spiral -puts och polerhjul- ett allsidigt hjälpmedel för användning efter konturering!

Sof-Lex™ systemet har varit en långvarig favorit hos många tandläkare som vill ha ett estetiskt och vackert slutresultat. Nu har, 3M ESPE uppfunnit hjulet igen genom att ta fram en ny innovativ produkt till marknaden, som gör puts och polering lätt. Med detta puts -och poleringssystem i två steg kan du snabbt putsa och polera fyllningarnas alla ytor och från olika vinklar till höglans.

En form till alla vinklar.

Den innovativa och flexibla formen anpassar sig lätt till ojämna, konkava och konvexa tandytor. Anteriora och posteriora restaureringar kan putsas och poleras med ett hjul - det behövs ej bytas mellan spets, gummikopp, trissor och borstar.

“Spiral hjulet är enastående i dess möjligheter att komma åt på alla svåra ställen såsom olika vinklar och vrår på den occlusala ytan.”


Dr. Bob Marolt, DDS

Ett hjul arbetar från alla olika vinklar.

Sof-Lex Spiral hjul gör det enklare att arbeta intraoralt – speciellt på utmanande posteriora fyllningar. Varför?. de avverkande partiklarna finns över hela hjulet, så att alla delar av spiral hjulet kan användas: approximant på tuggytan, ner i fissurerna och på buccalytan av kaviteten. Detta resulterar i att spiral hjulet är effektivt från alla vinklar.



Occlusalt

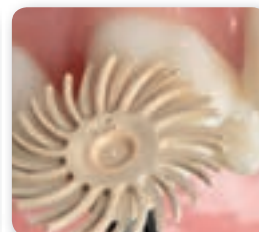

Buccalt




Lingvalt Posteriort



Lingvalt Anteriort



Facialt

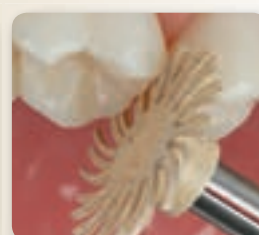

Approximalt

Sof-Lex Spiral hjul kan användas till puts och polering till:

Komposit

Resinmodifierade glasjonomerer

Temporära material

Resin Nano Ceramic –

Lava™ Ultimate CAD/CAM material


Ädla och halvädla metaller

Spiralhjulen ger en vacker lyster och högglanspolering.

Det fina putshjulet (beigt), putsar och tar bort ojämnheter som uppstått under kontureringen och förbereder ytan för högglanspolering.

Det superfina polerhjulet (vitt), ger en alldeles särskild blank polering upp till högglans, speciellt med en nanokomposit såsom Filtek™ Supreme XTE universal komposit. Ett enkelt system för att snabbt få en högglanspolerad fyllning.

För bästa resultat använd ett lätt tryck och med låg hastighet under både puts och poleringsstegen Sof-Lex™ Spiral hjul är för engångsbruk och kan användas utan polerpasta och vattenkyllning. Spar dig tid.

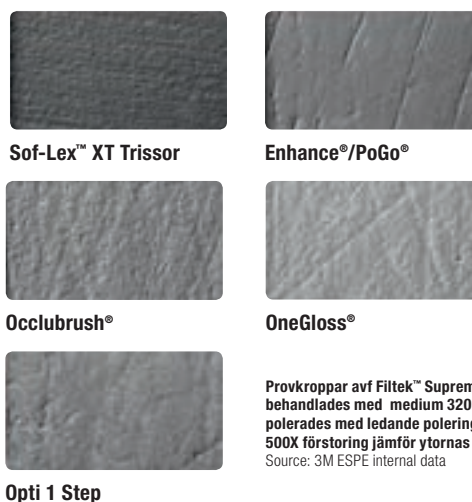

“Det flexibla hjulet är snällare emot mjukvävnaden jämfört med andra typer av roterande instrument.”

Dr. James Braun, DDS, MS

Sof-Lex Systemet

Sof-Lex Spiral puts och polerhjul är framtagna till vårt Sof-Lex™ system, och kan därför användas med samma mandrell som till Sof-Lex trissor.

	Sof-Lex™ Trissor	Sof-Lex™ XT Trissor	Sof-Lex™ Strips	Sof-Lex™ Spiral hjul	Anteriort	Posteriot	Approximalt
GROV AVVERKNING	<ul style="list-style-type: none"> Ta bort överskott Utforma anatomin 				Sof-Lex™ Trissor, Grov Roterande grova eller medium kontureringsinstrument (t.ex. diamanter, karbidborr, stenar)	Roterande grova eller medium kontureringsinstrument (t.ex. diamanter, karbidborr, stenar)	Sof-Lex™ XT Trissor, Grov Sof-Lex™ Strips · Grov/Medium · Grov/Medium, tät
KONTURERING	<ul style="list-style-type: none"> Reducera yträhet Slutkonturering av anatomi 				Sof-Lex™ Trissor, Medium Roterande medium eller fina kontureringsinstrument (t.ex. gul eller röd ring på diamanterna)	Roterande medium eller fina kontureringsinstrument (t.ex. gul eller röd ring på diamanterna)	Sof-Lex™ XT Trissor, Medium Sof-Lex™ Strips · Grov/Medium · Grov/Medium, Tät
PUTS	<ul style="list-style-type: none"> Ta bort ojämnheter Slät yta Förpolering 				Sof-Lex™ Spiral putshjul Sof-Lex™ Trissor, Fin	Sof-Lex™ Spiral putshjul	Sof-Lex™ Spiral putshjul Sof-Lex™ XT Trissor, Fin Sof-Lex™ Strips, Fin/Superfin
POLERING	<ul style="list-style-type: none"> Slutpolering till högglans 				Sof-Lex™ Spiralpoleringshjul Sof-Lex™ Trissor, Superfin	Sof-Lex™ Spiral poleringshjul	Sof-Lex™ Spiral poleringshjul Sof-Lex™ XT Trissor, Superfin Sof-Lex™ Strips, Fin/Superfin

Beställningsinformation



Sof-Lex™ Spiral hjul, introduktionskit 5081I

Art.nr.	Produktinformation																								
5082I	Sof-Lex™ Spiral Hjul – Introduktionskit 10 Sof-Lex™ Spiral Puts hjul (beiga); 10 Sof-Lex™ Spiral Poler hjul (vita); 1 RA Mandrell																								
5080	Sof-Lex™ Spiral Puts hjul – Refill 30 Sof-Lex™ Spiral Puts hjul (beiga)																								
5081	Sof-Lex™ Spiral Polerings hjul – Refill 30 Sof-Lex™ Spiral Polerings hjul (vita)																								
5082SK	Sof-Lex™ Spiral hjul, trissor och strips – System Kit 10 Sof-Lex™ Spiral Puts hjul (beiga) 10 Sof-Lex™ Spiral Polerings hjul (vita) Sof-Lex™ poleringstrissa 12.7 mm: 30 st av varje 2382C (Grovt); 2382M (Medium); 2382F (Fin); 2382SF (Superfin) Sof-Lex™ XT Poleringstrissa 9.5 mm: 30 st av varje 2381C (Grovt); 2381M (Medium); 2381F (Fin); 2381SF (Superfin) Sof-Lex™ Putsstrips: 15 st 1954C/M (Grovt/Medium) 1 RA Mandrell																								
1980	Sof-Lex™ Trissor och strips – System Kit 30 trissor av varje grovt, medium, fin, och superfin i både 12.7 mm och 9.5 mm diameter; 1 RA mandrell																								
Sof-Lex™ puts och polerings trissor Refill Varje refill innehåller 85 trissor																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">9.5 mm</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">12.7 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1981C Grovt</td> <td>1981M Medium</td> <td>1981F Fin</td> <td>1981SF Superfin</td> <td>1982C Grovt</td> <td>1982M Medium</td> <td>1982F Fin</td> <td>1982SF Superfin</td> </tr> </table>		9.5 mm				12.7 mm												1981C Grovt	1981M Medium	1981F Fin	1981SF Superfin	1982C Grovt	1982M Medium	1982F Fin	1982SF Superfin
9.5 mm				12.7 mm																					
1981C Grovt	1981M Medium	1981F Fin	1981SF Superfin	1982C Grovt	1982M Medium	1982F Fin	1982SF Superfin																		
2380	Sof-Lex™ Extra tunna trissor och strips kit 30 trissor av varje grovt, medium, fin, och superfin i både 12.7 mm och 9.5 mm diameter; 1 RA mandrell																								
Sof-Lex™ extra tunna puts och-poler trissor, Refill Varje refill innehåller 85 trissor																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">9.5 mm</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">12.7 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2381C Grovt</td> <td>2381M Medium</td> <td>2381F Fin</td> <td>2381SF Superfin</td> <td>2382C Grovt</td> <td>2382M Medium</td> <td>2382F Fin</td> <td>2382SF Superfin</td> </tr> </table>		9.5 mm				12.7 mm												2381C Grovt	2381M Medium	2381F Fin	2381SF Superfin	2382C Grovt	2382M Medium	2382F Fin	2382SF Superfin
9.5 mm				12.7 mm																					
2381C Grovt	2381M Medium	2381F Fin	2381SF Superfin	2382C Grovt	2382M Medium	2382F Fin	2382SF Superfin																		
Sof-Lex™ Puts strips refill																									
1954	Klar Grovt/Medium Innehåller 150 strips																								
1954N	Klar Grovt/Medium Innehåller 100 strips																								
1956	Blå Fin/Superfin Innehåller 120 strips																								
3M™ ESPE™ Mandrell Refiller																									
1983RA	3 RA mandreller för högerhandsfattning av Sof-Lex™																								
1983HP	3 HP mandreller för laboratoriehandsstycken för Sof-Lex™																								
1983FG	3 FG mandreller för FG fattning till Sof-Lex™																								



3M ESPE

3M Svenska AB
3MESPE Dentalprodukter
Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
info@3mespe.com
www.3MESPE.se

3M, ESPE, Filtek, Lava och Sof-Lex är varumärken från 3M Company eller 3M Tyskland GmbH. Används under licens i Canada. Alla andra varumärken ägs av andra företag ©2013, 3M. Alla rättigheter förbehålles 01 (08.2013)