

Fantastisk åtkomst och praktisk torrläggning på ett bekvämt sätt!

Nya Umbrella™ tung-, läpp- och kindretraktor

En av de grundläggande insikterna i vår moderna dentala värld är vikten av att upprätthålla en god munhygien. Trots alla ansträngningar är det emellertid oundvikligt att tidskrävande dentala behandlingar måste utföras då och då. Det är i det här läget som tandvårdsteamet möter många utmaningar.

Fri åtkomst till behandlingsområdet: Enklare sagt än gjort!

Vad tandvårdsteamet önskar sig är bekväma arbetsförhållanden, ett bra synfält över behandlingsområdet och därmed lyckade behandlingsresultat. Först och främst behövs en öppen och obehindrad åtkomst till behandlingsområdet. Vad som kan låta enkelt är för det mesta svåruppnåeligt. I många fall är "störande element" i vägen. Mjukvävnader som läppar, tunga och kinder gör det ibland svårt för tandläkare att utföra smidiga och krångelfria behandlingar. Kort sagt: En effektiv retraktion av all mjukvävnad kan vara avgörande.

Klassiska kindretraktorer

Vanliga instrument, som kindretraktorer, kan hjälpa till att hålla patientens kind borta från tänderna (precis som namnet utlovar). Men saliven då, och styrningen av tungan och kväljningsreflexen som många patienter får problem med vid den här typen av retraktorer?

De flesta kindretraktorer på marknaden har, både ur användarens synpunkt och patientens, problem med att lösa de här bekymren på ett tillfredsställande sätt. Att använda dem för tidskrävande behandlingar kan leda till att retraktionen ger efter, muskler tröttnas ut och patienten blir ängslig. Följaktligen en tråkig upplevelse för alla inblandade. Vem skulle inte önska sig bättre alternativ?

Umbrella™ tung-, läpp- och kindretraktor:

Mer än bara hålla bort mjukvävnaden

I samklang med sin vision att hjälpa till att förbättra nivån på tandvården i världen har Ultradent Products utvecklat den helt nya tung-, läpp- och kindretraktorn Umbrella™. Den är konstruerad för att öka patientens totala bekvämlighet genom att samtidigt skapa och bibehålla fri åtkomst till arbetsfältet.

Med patientens välbefinnande i första rummet

Umbrella-retraktorn är fjädrande. Den passar bekvämt till formen på den individuella munnen och håller den varsamt öppen. Hädanefter är det lyckligtvis slut på att behöva dra och slita i läppar och kinder.



Tung-, läpp- och kindretraktorn Umbrella håller patientens mun öppen på ett naturligt sätt. Den medger också fullständig munstängning, vilket gör att muskelspänning kan undvikas.

Effektiv styrning av tunga och saliv

Det innovativa tungretraktionssystemet gör att tungan bekvämt vilar bakom tungskyddet och är helt avskild från arbetsfältet. På samma sätt ger Umbrella lättnad för patienter med benägenhet för kväljningar, eftersom den hos merparten inte aktiverar den reflexen. Möjligheten att motverka kväljning är en stor vinst för varje användare. Umbrella öppnar upp utrymmet mellan tänderna, läpparna och kinderna på ett sätt som stimulerar saliven att ansamlas på avstånd från tänderna - för bättre åtkomst med sugen och för att minska risken för kontaminering. När fördelarna med det inbyggda tungskyddet sammanfattas, tycker tandläkarna att det finns tillräckligt med utrymme för allt de behöver göra: arbetsfältet hålls helt öppet för att enkelt suga och hålla torrt. Dessutom förbättras patientkomforten avsevärt då Umbrellas tungskydd vägleder patientens tunga på plats, och eliminerar all störande påverkan.



En ny, innovativ utformning av tungretraktionen låter tungan vila bekvämt bakom tungskyddet.

Enkel införing möter tillförlitlig stabilitet

Umbrella-retraktorn är enkel att placera och har anatomiskt utformade stöd som gör att användaren kan låta handen vila mot patientens mun utan att orsaka besvär. Samtidigt ger Umbrella tillförlitlig stabilitet, även i de fall där bettkontroll behöver utföras. Retraktorn kan även kombineras med ett bitblock, medan tungan bekvämt vilar bakom tungskyddet.

Bara så mångsidig!


Engångs-retraktorn kan radikalt ändra behandlingssätt och är lämplig för en rad olika tillämpningar. För att bara nämna några få: fastsättning av ortodontiska brackets och band, tandblekning på kliniken, kronor och skalfasader, bilaterala anteriora och posteriora fyllningar, fickdjupsmätning, implantatbehandling, kirurgiska ingrepp, fissurförsegling etc.

Steg 1.



Förbered tung-, läpp- och kindretraktorn Umbrella™ för införing genom att trycka samman flikarna.

Steg 2.

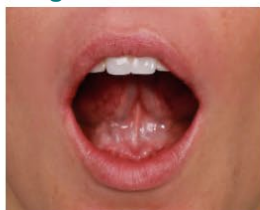

Be patienten placera sin tungspets mot gommen.

Steg 3.



För först in ena sidan av retraktorn i patientens mun och för därefter försiktigt in den andra sidan mot kinden.

Steg 4.



Centrera retraktorn i patientens mun med hjälp av flikarna.

Steg 5.



För att säkerställa enkel åtkomst bör patientens tunga nu vila bekvämt bakom tungskyddet.

Steg-för-steg: Så här används tung-, läpp- och kindretraktorn Umbrella.

För mer information, se videon: <https://youtu.be/mlqQcKSCE1Q>

Den perfekta avvägningen

Det som är bra för patienten är bra för tandläkaren: tung-, läpp- och kindretraktorn Umbrella tillhandahåller stabil åtkomst, enkel placering och riktig bekvämlighet. Umbrella kombinerar många fördelar i en lättanvänd produkt och är ett idealiskt tillskott för alla användare som vill ge sina patienter skonsam och högkvalitativ tandvård – den perfekta avvägningen.



Tung-, läpp- och kindretraktorn Umbrella kombinerar många fördelar i en lättanvänd produkt och är ett idealiskt tillskott för alla användare som vill ge sina patienter skonsam och högkvalitativ tandvård.

Ytterligare information

Fördelarna med Umbrella: www.ultradent.com/eu

Umbrella Steg-för-steg Video

YouTube: <https://youtu.be/mlqQcKSCE1Q>

Umbrella Tillämpningar Video

YouTube: <https://youtu.be/DCDkXkK-Dq0>