



ULTRADENT PRODUCTS CLINICAL TIPS

J-TEMPTM PROVISORISKT DENTALT RESIN

James Wright, DDS



I denna upplaga av *Clinical Tips* välkomnar vi dr James M. Wright, och hans erfarenhet av J-Temp provisoriskt resin.

Vad är det som gör J-Temp resin annorlunda?

"J-Temp är så mångsidigt. Det levereras i en spruta och kan dispenseras som ett flytande material. Det ljushärdas, vilket påskyndar de avslutande stegen av behandlingar som kräver en provisorisk fyllning."

För vilka procedurer fungerar det bäst?

"Om en patient kommer med en trasig tand som skulle behöva en krona, då är J-Temp toppen för att kunna återskapa korrekt anatomi för ett avtryck för en provisorisk krona.

Det kan också användas för att tillfälligt försluta öppningen till en rotkanal. Det är lätt att använda genom att injicera materialet rakt in i området för rotkanalsöppningen och ljushärda materialet (sen behövs bara en enkel ocklusal justering). Man behöver inte längre använda ett provisoriskt material som är mjukt och behöva vänta på att det ska stelna. När patienten kommer tillbaka för den definitiva

restaurationen är det lätt att ta bort och lämnar inga rester.

En annan användning vid rotbehandlingar är om det saknas tandstruktur (som gör det svårt att placera klammern för kofferdam på tanden). Även då, ger J-Temp ett snabbt och enkelt sätt att bygga upp området för att stödja klammern, ofta utan att man behöver bonda materialet.

När man gör provisorier för onlay eller inlägg är det enkelt att placera J-Temp med vilket matrissystem som helst för att uppnå idealiska kontakter. Fördelarna med ett ljushärdat material är att det är lätt att applicera, den korta härdningstiden gör det snabbt och ocklusionen kan justeras med high-speed.

Ett annat användningsområde inom dentala implantat är när tandläkaren tar ett avtryck för en implantatstödd bro. Ibland kan distortion uppstå under avtryckstagningen, vilket drar avtryckstopparna mot varandra. J-Temp kan placeras som en splint för att stabilisera avtryckstopparna och bidra till att förebygga distortion.

När en intern blekningsbehandling behövs är J-Temp ett snabbt och enkelt sätt att försegla blekningsmaterialet i tanden tills patienten kommer tillbaka efter avslutad behandling."

Flera användbara fördelar

J-Temp provisoriskt resin ger en försegling som härdar utan luftfickor i fuktig miljö. Det är självutjämnande vilket ger en jämn fördelning av materialet - därmed skapas en utmärkt försegling som lätt kan avlägsnas med en standardbörst när behandlingen återupptas. Det kan också ljushärdas för att stelna snabbt. "Den ljuslila färgen gör att det är lätt att se och ta bort [. .]

I grund och botten är det hastighet och lätthanterlighet som gör J-Temp till ett överlägset material för provisorier för mig."

Sammanfattningsvis: J-Temp resin är ett material för många indikationer med självutjämnande viskositet och ljushärdad snabbhet. Lägg därtill fördelarna med en färdigblandad och enkel applicering med Ultradent Products Black Mini™ Tip.

Lite grand om J-Temp resin

Det utvecklades i avsikt att skapa en produkt som kan användas för fyra olika procedurer/indikationer.

- Provisoriska fyllningar
- Splinting mellan avtryckstoppar vid avtryck med multipla implantat
- Struktur som fäste för isolering med klammer och som barriär för spolvätskor
- Bitvallar och provisorisk betthöjning

I princip kan man säga att en produkt för flera procedurer sparar både tid, pengar och plats för tandläkare och endodontister.

Mer om doktorn:

Dr Wright studerade till tandläkare vid Marquette University School of Dentistry. Idag är han verksam med allmän och kosmetisk tandvård vid Eagle Gate Dental i Salt Lake City. Han är passionerad intresserad av munhälsovård och engagerad i att erbjuda vård och omsorg av exceptionell kvalitet till det omgivande samhället.



James Wright, DDS